



Der Diskmag (Magnetscheibe) ist ein Wellnessprodukt und für die Muskelentspannung entwickelt. Er kann auch für therapeutische Zwecke verwendet werden!

„Im Zweifelsfall ist immer ein Arzt aufzusuchen!“

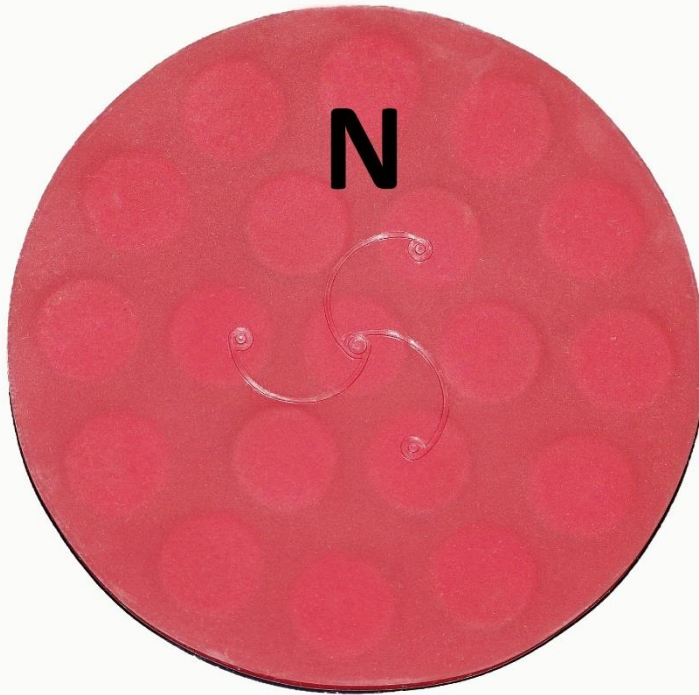

Rote Seite = Nordpol

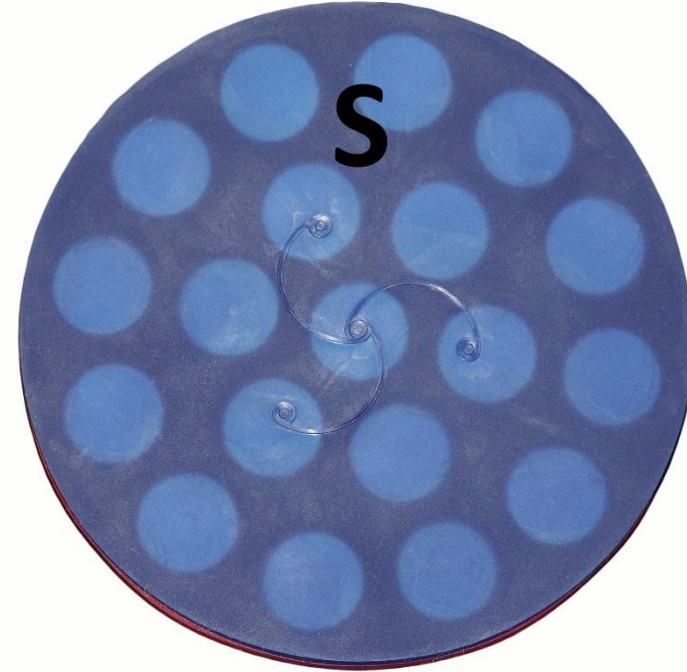

Blaue Seite = Südpol

Vor der ersten Anwendung:

Der Diskmag besteht aus hautfreundlichem medizinischem Silikon. Die einzelnen Silikonscheiben Hälften wurden mit speziellem Silikonkleber untrennbar verklebt. Der Kleber Geruch verfliegt nach den ersten Anwendungen.

Die Scheiben sollten vor der ersten Anwendung unter einem klarem Wasserstrahl abgespült werden. Die Scheiben sind Spritzwasserdicht.

Der Scheibenmagnet darf nicht geknickt werden.

Die Acrylglas Scheiben dienen zur Schonung der Silikonoberfläche wenn der Diskmag nicht benötigt wird. Die Metallscheiben, **bitte nie direkt auf die Silikonoberfläche legen!** Immer die Schonscheibe (Acrylglas Scheiben) dazwischen legen.


Die großen Metallscheiben nie ohne die Roten Abstandshalter auf den Diskmag + Schonscheibe legen!

Die Warnhinweise sind zu beachten!

Ich der Erfinder und Hersteller habe min. 5 Jahre
Anwendungserfahrung und diese sind alle positiv!

*Wenn sie diese Hinweise beherzigen, werde sie lange Freude an ihrem
Diskmag haben!*


Abstandhalter / Abziehhilfe!
Bitte immer so wie in der Abbildung
zu sehen ist den Diskmag
aufbewahren.

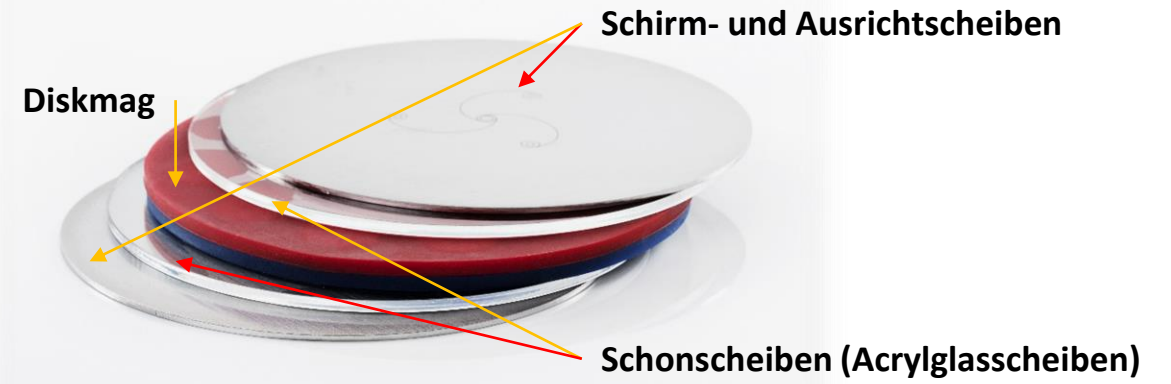

Haltescheiben




Typische Stellen für reguläre Verspannungen

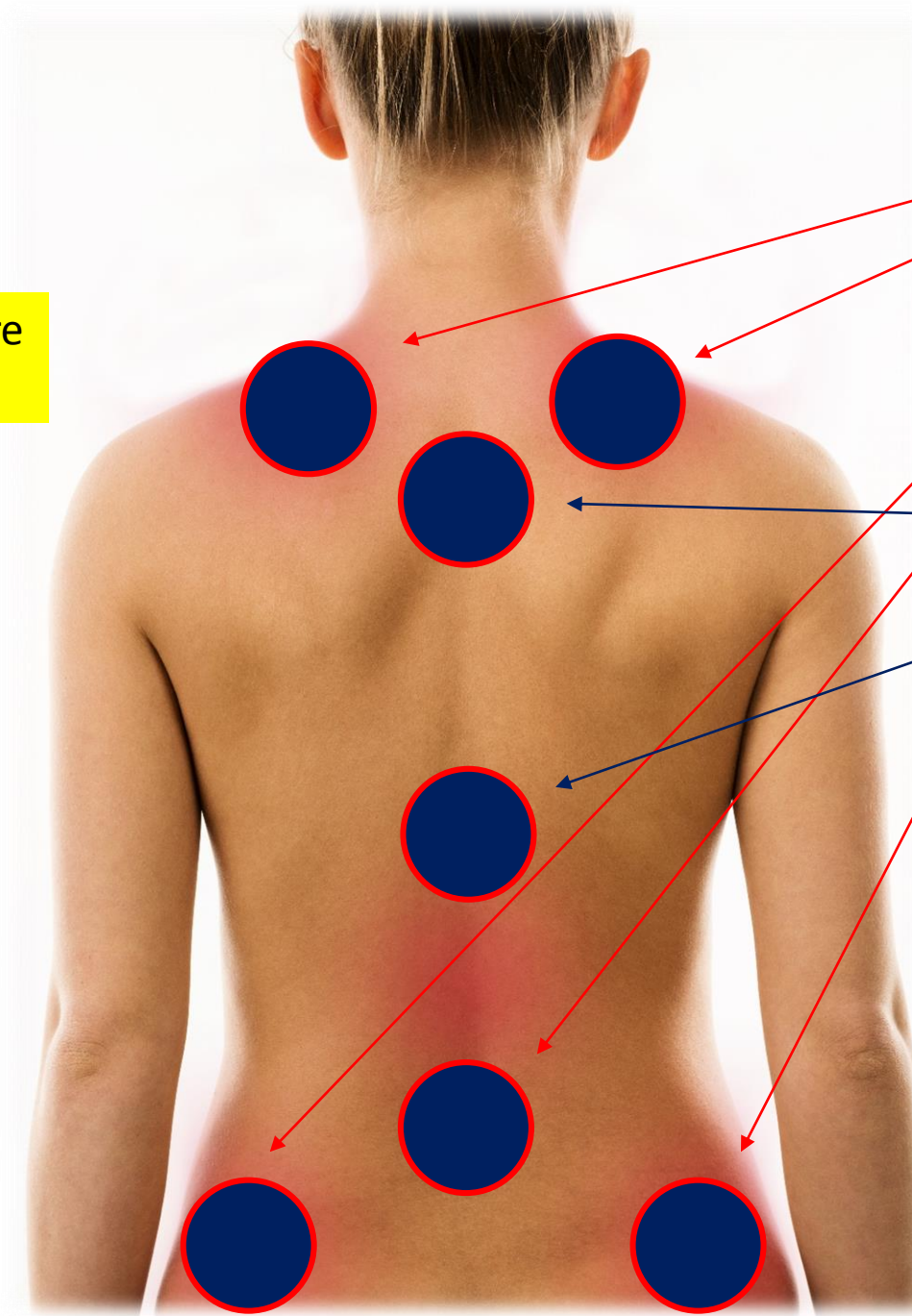

Positionen:
Magnetscheiben
unter der Kleidung
durch Metallscheiben
gehalten

Positionen:
Magnetscheiben
über einen Nieren-
gurt oder spezielle
Haltebandage aus
Festem Stoff
gehalten.

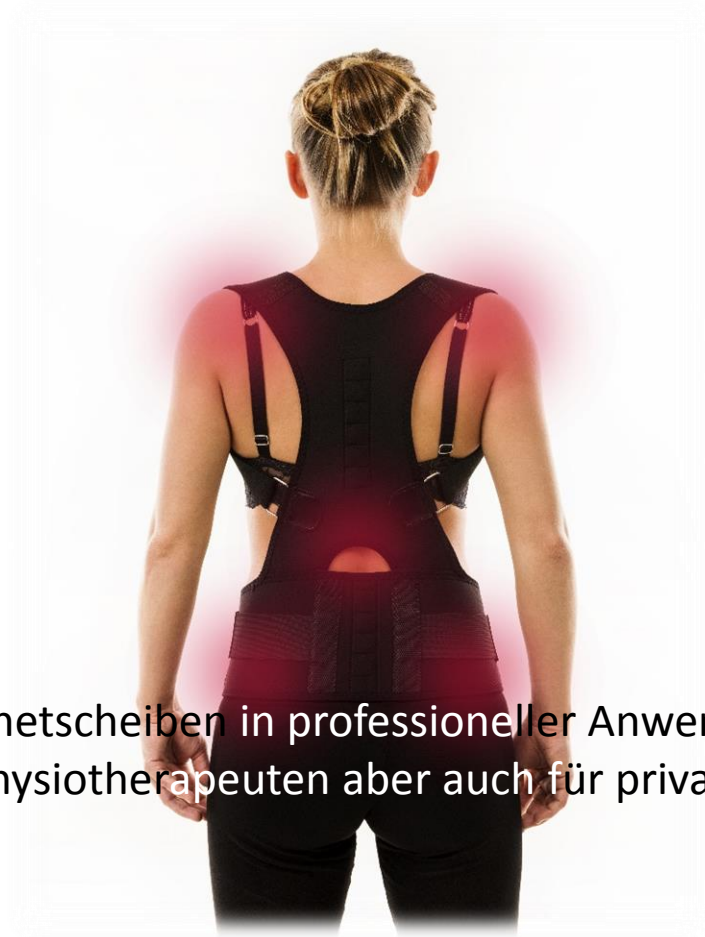

Magnetscheiben in professioneller Anwendung
z.B. für Physiotherapeuten aber auch für privat zu hause





Magnetscheiben im Alltag unter der Kleidung durch Metallscheiben gehalten



Magnetscheiben unter der Kleidung durch Metallscheiben gehalten



Anwendungen bei Verspannungen in den Armen oder Beinen.





Der Diskmag ist einer der stärksten Permanentmagnet Produkte
die derzeit auf dem Markt etabliert werden.

Er verfügt über 18 starke Neodym Magnete die in einer Ausführungsform
ca.15 cm tief in den Körper einwirken.

Dabei helfen sie bei der Sauerstoffanreicherung der roten Blutkörperchen.
Die Folge davon ist eine Dehnung des Gewebes und Förderung der Durchblutung.
Dies führt zur Erwärmung der Muskulatur und zum schnellen und effizienten Abbau
von Muskelverspannungen.

Der Diskmag kann sowohl im Nacken-, Rücken-, Hüftbereich als auch für Arme und Beine verwendet
werden.

Material:

Der Diskmag besteht aus medizinischen hautfreundlichen Silikon und ist bei fachgerechter Anwendung
lebenslang haltbar.

Bezugsquelle:

Firma Trionis / Alexander Rosenmeier / Friedhofring 4 / D-84178 Kröning
alex.rosenmeier(at)web.de / Tel.: 0176 / 631 534 08